# 罗氏 LightCycler480 软件安装及卸载重装

软件安装大致流程:

- 1、运行安装包,需注意修改"Software"及"Exor4"安装路径
- 2、(重要)安装完成后需将安装包内"Data-HTC1.sxc"文件移至安装目录下

#### 一、软件安装

双击打开 🛃 LightCycler480\_Software\_Setup



第一步: Next



第二步: Yes

elect Components Choose the components Setup will	install		
choose the components setup will	in Istan.		
Select the components you want to install.	o install, and clear the c	omponents you do not want to	
LightCycler?480 Application	n Software	└ Description	
LightCycler?480 Application Software Exor 4 Database		This Component includes all LightCycler?480 Software components.	
Space Required on C: Space Available on C:	141312 K 81522216 K		
allShield			

第三步:默认选项,不做修改。Next

	Choose Folder	?	×
	Please choose the installation folder.		
	Path: C:\Program Files (x86)\Roche\LightCycler480		_
	Directories:	d 1	
InstallShield Wizard	Program Files (x86)     350     Common riles		^
Choose LightCycler?480 location	> Coogle > Internet Explorer > Microsoft.NBT		
Please select the location for the LightCycler?480 Softw	<ul> <li>Vindows Defender</li> <li>Vindows Mail</li> <li>Windows Media Player</li> <li>Windows Multin edia Platform</li> </ul>	n	*
□ Destination Folder     □	确定	取消	
C:\Program Files (x86)\Roche\LightCycler480	Browse		
InstallShield < Ba	ack Next> Flancel @惨不忍睹的	IQQ≊	之间

第四步: 需修改安装路径, 仅将安装路径中"(x86)"删除, 注意空格也需删除



第四步修改后状态, Next



第五步:默认选项,不做修改。Next

Cho	ose Folder	?	×
Ple	ase choose	e the installation folder.	
Pat	:h:		
C	Program F	iles (x86)\Roche\Exor4	
Dir	ectories:		
	~	Program Files (x86)	^
	>	360	
stallShield Wizard	>	📙 Common Files	
	>	📙 Google	
"hoose Exor4 locatic	>	Internet Explorer	
	>	Microsoft.NET	
Please select the loca	> 📙 Windows Defender		
	Windows Mail		
	>	📙 Windows Media Player	
		Windows Multimedia Platform	~
		确定取消	í
- Destination Folder			
C:\Program Files (x86)\Rc	oche\Exor4	Browse	
stallShield			
			nal
		Chark Filther Syl King Ball	1922

第六步:同第四步一样,仅将安装路径中"(x86)"删除,注意空格也需删除。Next

stallshield Wizard Choose Exor4 data file location	
Please select the location for the Exor4 data file.	
	C
Destination Folder	
Destination Folder C:\ProgramData\Roche\Exor4\Data	Browse
Destination Folder     C:\ProgramData\Roche\Exor4\Data     aliShield	Browse

第七步:默认路径,不做修改。Next

InstallShield Wizard		×
Select a database option		Nº4
Choose an existing database, or create a new o	latabase'.	
<ul> <li>Create New Traceable Database</li> <li>Create New Research Database</li> </ul>		
InstallShield		
	< Back	napless to a real section of the d

第八步:选择第二项 创建 Research 数据库, Next

InstallShield Wizard		Х
Enter Text Please enter information in the field below.		LEA .
New Database Name		
XDMS B		
InstallShield		
	< Back	

第九步:默认数据库名称,不修改。Next

InstallShield Wizard	×
Exor4 icons.	Les 1
Please select desired Exor4 icons.	
🔽 Exor4 Desktop Icon	
🔽 Exor4 Program Menu Icon	
🔽 Exor4 Startup Menu Icon	
✓ Database Compression Tool	
InstallShield	
	<back td="" 如何和她有不能能够的知道。<=""></back>

第十步:默认选项,不修改。Next 后自动安装

Jight Lycler (480 Setup is performing Question	g the requested operations.
You may install Add system. Would you	obe Acrobat Reader if it is not installed on your like to install it now?
	是(Y) 否(N)

安装完成后,检测到无 Adobe Read 软件,需点"是"安装。如果已经安装了 PDF 阅读器, 点否(NO)

Adobe Read 安装过程依次点击"Next-Install-Finsh"即可。

InstallShield Wizard	
	InstallShield Wizard Complete
	This system needs to be rebooted in order to establish connection to database
	Yes, I want to restart my computer now. No.1 will restart my computer later.
	Remove any disks from their drives, and then click Finish to complete setup.
	<back 知<b="">平 随時不認識的的空間</back>

Adobe Read 完成后,注意保存正在编辑的文档。跳出的安装界面选择第一项,重启电脑。

跳出 480 安装完成界面。重启电脑。



重启电脑后,开机自动运行 Exor,提供数据库服务

## 第十一步 (重要):复制文件至安装目录

① 打开安装包内的 Data 文件夹,将"HTC1.sxc"复制到"C:\Program Files\Roche\LightCycler480\Bin"目录下。



至此,软件即可正常打开使用

②在"C:\Program Files\Roche\LightCycler480\Bin"目录下找到 HTC1 图标,单击右键、发送

<mark>┃   ⑦ ┃ <del>、</del>   文件 主页 共</mark>	享 查看	<ul> <li>         ・         ・         ・</li></ul>						New P	□ × ~ (2)
← → * ↑ □<	<本地磁盘 (C:)	固定到"开始"屏幕(P)		Bin	~	Ō			م
<ul> <li>★ 快速访问</li> <li>桌面</li> <li>↓ 下或</li> <li>☆ 下或</li> <li>☆ 図片</li> <li>配片</li> <li>副 视频</li> <li>♪ 音乐</li> <li>④ OneDrive</li> <li>□ 出用脑</li> </ul>	名称 ④ hard ● hg.d ● hg.d ● histe ● histe ● histe ● histe ● three ●	<ul> <li>■ 添加到压缩文件(A)</li> <li>■ 添加到工缩文件(A)</li> <li>■ 添加到 "HTC1.zip*(T)</li> <li>■ 開名の压缩打开(Q)</li> <li>■ 解压到(F)</li> <li>■ 解压到当前文件夹(X)</li> <li>■ 解压到 HTC1\(E)</li> <li>■ 其他压缩命令</li> <li>● 使用 Windows Defender扫描</li> <li>レ 共享</li> <li>■ 武型任务栏(K)</li> <li>&gt;还面比当的形式(Q)</li> </ul>	>	3:54 2:28 2:36 49 7:41 7:41 7:41 7:41 7:41	类型 应用ft 应用ft 应用ft MAP SXC BPL BPL BPL BPL	留	展展展展	大小 108 KB 828 KB 824 KB 52 KB 22 KB 26 KB 42 KB 2,696 KB 135 KB 55 KB	^
📥 网络	HTC	2:3:4:0(4)	S	:41		文件		41 KB	
E COM	П нтс Нтс Нтс Нтс П нтс	覧切(T) 复制(C) 私呪(P)			TEARCHY 蓝牙设备 文档 圧缩(zipped)	)文件3	e Martin	5708466 C	<u>्रकाल</u> *
240 个项目 选中 1	个项目 31.5 KB	创建快捷方式(S)			「東面快捷方式	Ť	31	1.1075515377	

至桌面快捷方式,方便以后打开使用。安装后图标为

### 第十二步:软件登录连接

1. 打开软件,输入初始用户名: admin, 密码: LightCycler480

2. 设置连接虚拟机:

①进入软件后点右侧

②选择Instruments(下图红框圈出的地方)

③选择虚拟机Virtual LightCycler 480 96 System II(下图红框圈出的地方)

④点击Test connection,稍等一会提示连接成功

⑤点击右下角Make Default(上图红框圈出的地方),然后点close即连接完成。 软件连接完成后,可以模拟真机进行操作。

- Users and Groups - System Settings		Connection	Operation	Log		Self Test
Report Settings Error Log Database Information - View Logged In Users - Update Query Engine - Clean-up Database Instruments Formate Formate	Connection Name IP Address	Settings	480 96 System II	Test	Connectio	Absolute Intensity 1 Operation Time (h) 1 Reset values after Lamp Chan
	Instrument I Instrument I Technical Ir	Enabled nformation D Virtual-96-SysII formation	Excitations Filters	Block Size 96	Clear F Mixed	Altes Plates (user configurable) Block Type Aluminum
	D Not Conne	cted	Pos Wavelength           1         440           2         465           3         498           4         533           5         618			SWavelength           488           510           580           610           640           660

### 二、其他注意事项及可选配置

在不每天都使用 480 软件时,建议关闭 Exor4 软件的开机自启,会占用一定系统资源。

关闭方法:

• 对桌面底端任务栏空白处单击鼠标右键、打开任务管理



或按键盘 Ctr+Alt+Delter 点开详细信息,找到"启动"菜单

№ 任务管理器		3203		×
	未运行任何应用			
	6.38	37V3525-3	はまげ	20
	知乎(	回修不同	2時的19	の空间

首次打开任务管理器,需点开详细信息

₩ 任务管理器 文件(F) 洗项(C) 音看(V)		<u>(19)</u>	
进程 性能 应用历史记录 启动 用/	⇒ 详细信息 服务		
		上次 BIOS)	所用时间: 0.0 秒
へ 名称	发布者	状态	启动影响
Adobe Acrobat SpeedLau	Adobe Systems Incor	已启用	低
🚔 Exor4		已启用	高
⊕ Windows Security notifica	Microsoft Corporation	已启用	低
<			>
	知	乎 @惨不忍	時的夏夏至何

点开"启动"菜单,找到 Exor4

对 Exor4 单击鼠标右键,选择禁用。

₩ 任务管理器 文件(F) 选项(O)	) 查看(V)						<u>(a)</u> }	
进程 性能 应用	用历史记录 启动	用户	详细信息	服务				
						上次 BIO	S 所用B	时间: 0.0 秒
名称	^	法	立布者			状态		启动影响
🔳 Adobe A	Acrobat SpeedL	au A	dobe Syst	ems Ir	cor	已启用		低
📚 Exor4	-			-		已启用		高
🕀 Window	s 禁用(D) 打开文件 在线搜索 属性(I)	」 新在的( \$(S)	位 <mark>置</mark> (O)		ation	已启用		低
<								>
简略信息(D	)				织	呼 @惨不	忍聞	<b>MARAN</b> E

开启 Exor4 的开机自启方法同理。

#### 三、软件卸载后无法重装问题及解决方法

在软件安装时错误选择安装目录会导致安装失败,软件卸载后重新安装软件时会弹出如下 报错:

Uninstall	×
Â	You may not run this installer until you have uninstalled the currently installed version of LightCycler® 480.
	To uninstall you must either:
	1) Run the currently installed LightCycler® 480 installer to uninstall.
	<ol> <li>Uninstall LightCycler® 480 using the Windows</li> <li>'Add or Remove Programs' Control Panel.</li> </ol>
	[ <del>2</del>
	知乎。如何有些法律

出现报错截图,导致无法继续安装

王政 共尊	±14					Ŷ
· • • •	higram has possible statistical installation of creation			- 0. 2	現象'NetalShiel(NetaliationInternation)'	
and a	58	将改日期	#21	大小		
-	ProductCode]	2021/0/23 11:17	779.8			
-	BD1E2052-14CE-485C-A75A-6381C8839E1A)	2023/0/23 13:21	文件史			
245	ISF07FABD S88A-43EF-979E-6E7C9E4F811E	2023/0/2518:28	1349			
EH:						
10.00	r.					
and the second						
and the second						
<b>EBE</b>						
ID Still						
KUB .						
EP4						
CHB						
- 66						
110.						
England M.A.	(					
Section (Dr)						
there yer						
15						
18						

打开资源管理器,进入目录

C:\Program Files (x86)\InstallShield Installation Information



将 {8F07FAB0-5BBA-43EF-979E-6E7C9E4F811E} 文件夹删除,即可重新运行安装程序

注意事项:

此方法安装完后, Exor 提供的端口(默认为 20481)号可能会变更。在软件登陆时需注意 修改端口号。